



Incidin® Dry Wipes System

Anwendungshinweise & Empfehlungen

Anwendungshinweise Incidin® Wipes Dispenser N mit Incidin® Premium Wipes



Handschuhe anziehen und Deckel abnehmen. Den Eimer vor der Wiederauffüllung mit Desinfektionslösung auswaschen und ggf. säubern.



2,5 L Incidin® Desinfektionslösung einfüllen: Incidin® Pro, Incidin® Plus, Incidin® Extra N und Incidin® Rapid in gewünschter Anwendungskonzentration befüllen.



Erstes Tuch durch die Deckelöffnung führen und den Eimer mit dem Deckel verschließen. Nach Einfüllen der Lösung 30 - 60 Minuten warten, sodass alle Tücher optimal durchtränkt sind.



Incidin® Premium Wipes mit Handschuhen aus der Verpackung entnehmen.



Incidin® Liquid und Incidin® Foam unverdünnt befüllen.



Nach dem Befüllvorgang das neue Sicherheitsetikett entsprechend beschriften und aufkleben.

Die getränkten Tücher können 28 Tage verwendet werden.



Die Rolle Incidin® Premium Wipes hineinstellen und erstes Tuch herausziehen.

