



Incidin® Dry Wipes System

Anwendungshinweise & Empfehlungen

Aufbereitung des Incidin® Wipes Dispensers

Um eine Kontamination des Inhalts zu verhindern, wird empfohlen, die Innenflächen des Eimers sowie den Verschluss zu reinigen und zu desinfizieren bevor erneut frische Incidin® Premium Wipes mit der Lösung versehen werden. Die Aufbereitung des Dispensers kann manuell oder automatisch erfolgen.

Nach diesem Vorgehen kann der Incidin® Wipes Dispenser N wieder aufgefüllt werden. Die Desinfektionslösung muss mit Wasser von Trinkqualität hergestellt werden. Der Incidin® Wipes Dispenser N kann mit ausgewählten Ecolab Flächendesinfektionsmitteln während einer Dauer von maximal 28 Tagen eingesetzt werden.

MANUELLE AUFBEREITUNG



1 Reste an Tüchern und Flüssigkeit aus dem Dispenser entfernen.



2 Für die Reinigung, alle abnehmbaren Teile des Deckelsystems abnehmen (Ring zur Deckelmontage, Tuchspenderdeckel und Verschlussdeckel) Behälter und Deckel mit Wasser oder Reinigungslösung (Allzweckreiniger) reinigen.



3 Vorbehandlung durch Spülen mit heißem Wasser (50-60 °C)* und anschließend mit einem Einmaltuch trocken wischen.



4 Die Innenflächen des Eimers und Deckels, sowie die Deckelöffnung innen und außen mit alkoholischem Desinfektionstuch, wie zum Beispiel mit Incides® N, sorgfältig desinfizieren. Alle Oberflächen sollten vollständig benetzt sein. Trocknen lassen.

MASCHINELLE AUFBEREITUNG**



1 Reste an Tüchern und Flüssigkeit aus dem Dispenser entfernen.



Reinigung und Desinfektion des Behälters, Dispenser und Deckel, durch einen chemothermischen Aufbereitungsprozess im RDG (Reinigungs- und Desinfektionsgerät) wie zum Beispiel Sekumatic® FRE als Reiniger und Sekumatic® FD zur Desinfektion oder Sekumatic® FDR und Sekumatic® FKN. Alternativ wäre auch eine Aufbereitung im Schuhprogramm möglich z.B. mit einem mildalkalischen Reiniger wie mit Sekumatic® Proclean.

* In Anlehnung an DVGW-Empfehlung W551

** Die Temperatur sollte während des gesamten Prozesses - inklusive des Trocknungsvorgangs - unter 65 °C liegen.

EUROPEAN HEADQUARTERS: ECOLAB EUROPE GMBH

Richtistrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland
+41(0)44-877-2001
www.ecolab.eu



ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49 (0) 2173-599-1900
www.ecolabhealthcare.de

