



FÖRDERANLAGE FÜR PROZESS- CHEMIKALIEN IM ZSVA-UMFELD

Ecolab FA

Förderanlage für Prozesschemikalien

Die Förderanlage dient der Versorgung maschinenintegrierter oder in unmittelbarer Nähe platzierter Day-Tanks / Vorlagebehälter von RDG (Reinigungs- und Desinfektionsgeräte).

- ▲ Höchste Betriebssicherheit
- ▲ Hohe Wirtschaftlichkeit durch Einsatz ökonomisch-sinnvoller Leitungssysteme
- ▲ Garantierte Verlässlichkeit

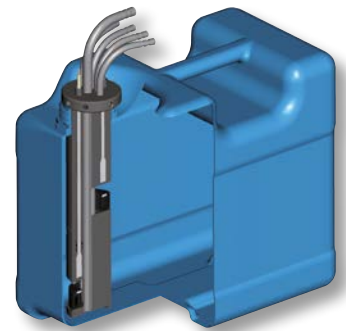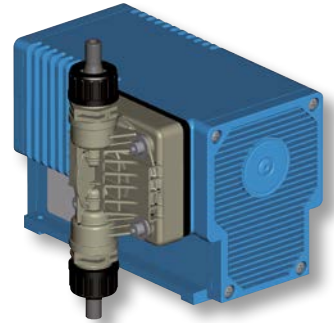

High-Tech
Made in Germany



Ecolab FA


Der Standard seit über 20 Jahren

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Anlagensteuerung per Mikroautomatisierung	Einfachste Bedienbarkeit, Prozess- und Versorgungssicherheit
Sicherstellung der RDG-Versorgung mit Prozesschemikalien durch automatisiertes und zuverlässiges Umfüllverfahren	Personalschutz, Rechts- und Betriebssicherheit gemäß gesetzlicher Bestimmungen
Langjährig bewährte und robuste Komponenten mit hoher Ausfallsicherheit und langer Standzeit	Qualitätsgarantie, Langlebigkeit, Effizienz und minimaler Wartungsaufwand
Einsatz ökonomisch sinnvoller Leitungssysteme	Hohe Wirtschaftlichkeit
Umfassendes Service-Paket, dichtes bundesweites Service-Netz durch eigenes Service-Team	Hohe Verfügbarkeit und kurze Reaktionszeiten

BESCHREIBUNG

Die Förderanlage dient der Versorgung maschinenintegrierter oder in unmittelbarer Nähe platzierter Day-Tanks/Vorlagebehälter von RDG (Reinigungs- und Desinfektionsgeräte). Die Förderanlage realisiert das vollautomatische Befüllen von Day-Tanks mit Prozesschemikalien aus Liefergebinden durch elektromotorisch betriebene Membranpumpen. Day-Tanks und Liefergebinde sind niveauerfasst mit der Anlagensteuerung verbunden, definierte Low-Level führen zu Reförderung oder Meldung an in- und externe Signalisierungen. Am Steuerungsdisplay werden Betriebszustände dargestellt, Anlagenparameter verändert und Meldungen quittiert. Sämtliche Abläufe werden überwacht, Überschreitungen gemeldet und bei Störungen die Anlagensegmente gesperrt.

ECOLAB FÖRDERANLAGE

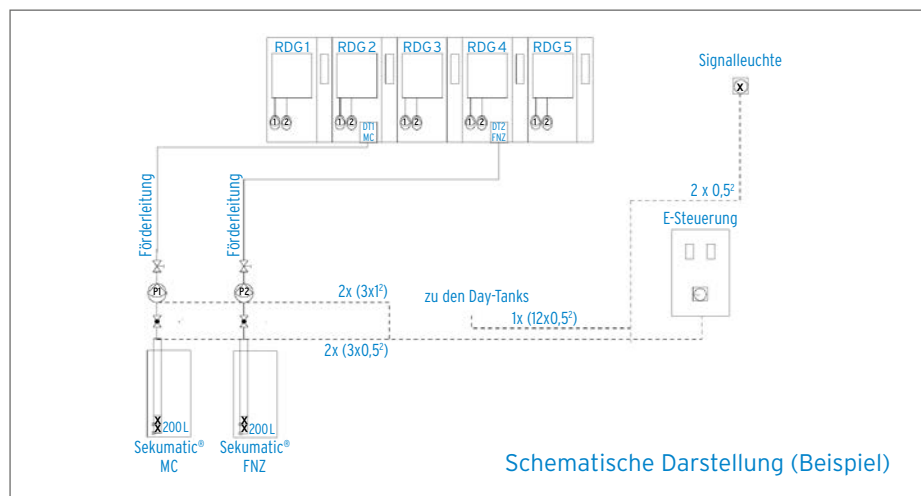

WORLDWIDE HEADQUARTERS

370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102
www.ecolab.com

REGIONAL OFFICE

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Phone +49 (0)2173-599-0
www.ecolabhealthcare.de

TECHNISCHE DATEN

- ▲ Versorgungsspannung: 230V 50Hz
- ▲ Steuerspannung: 24V DC
- ▲ Maße Elektroschaltschrank:
300 x 250 x 170 mm (H x B x T)
- ▲ Schutzart:
IP 44, mit Klarsichtdeckel
- ▲ Förderpumpen:
Membranpumpen 50 l/h bei 2 bar
- ▲ Anlagenkonsole:
PP 800 x 1000 x 15 mm (H x B x T)
- ▲ Sauglanzen: Reserve- und Leererfassung, 20/200 Liter
- ▲ Day-Tanks: Niveauerfassung, 24 V DC, 5 Liter
- ▲ Förderleitungen: Ecolab Safety Tube PE-Xa 12 x 2 mm (DIN 16892) oder alternativ: Edelstahl V4A 1.457, 8 x 1 mm (DIN 2643)
- ▲ Steuerleitungen: LiYY 12 x 0,5 mm²
- ▲ Signalisierung: Blitzleuchte 24 V DC

LIEFERUMFANG GEMÄSS PROJEKT-SPEZIFIKATION

- ▲ Technische Dokumentation
- ▲ Day-Tanks / Vorlagebehälter
- ▲ Pumpenkonsole
- ▲ Förderleitungen
- ▲ Förderpumpe
- ▲ Steuerleitungen
- ▲ Steuerung
- ▲ Sauglanze
- ▲ Signalleuchte
- ▲ Auffangwannen
- ▲ Gebidetransporthilfe
- ▲ Schutzausrüstungen

BESTELLINFORMATIONEN

Ecolab FA

auf Anfrage

SERVICE

Für die Instandhaltung (Wartung nach RKI etc.) steht Ihnen ein umfassendes Service-Portfolio zur Verfügung.

technischer.service@ecolab.com
Fax: 02173/59989806