



DAS PLUS AN LEISTUNG FÜR ALLE OBERFLÄCHEN

Incidin™ Plus

FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL MIT GLUCO- PROTAMIN™, ALDEHYDFREI UND OHNE QAV

Breites Wirkspektrum gegen Bakterien (inkl. MRSA), behüllte Viren und Hefen. Hohe Desinfektionsleistung auf allen abwaschbaren Flächen, selbst in Risikobereichen.

- ▲ Einzigartiger Wirkstoff Glucoprotamin™
- ▲ Breites Wirkspektrum
- ▲ Hervorragende Reinigungsleistung
- ▲ Ausgezeichnete Materialverträglichkeit



Incidin™ Plus

Flächendesinfektionsmittel mit Glucoprotamin™, aldehydfrei und ohne QAV

UNSERE LEISTUNG	IHR NUTZEN
Einziger Wirkstoff Glucoprotamin™	Ausgewählte Bestandteile und der biologisch abbaubare Wirkstoff (Glucoprotamin™) sorgen für eine nachhaltige Formulierung.
Hervorragende Reinigungsleistung	Zusatz von Reinigungsadditiven nicht notwendig
RKI-gelistet	Einsetzbar auch im Seuchenfall

WIRKSAMKEIT	KONZENTRATION %	ml/L	EINWIRKZEIT Min.
Flächendesinfektion gem. VAH-Verfahren 2015, hohe Belastung			
Bakterizid, levurozid	0,5/1,0	5/10	60/30
Prüfung nach DVV/RKI-Leitlinie			
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäß RKI-Empfehlung 1/2004*			
Rotavirus*	0,5	5	30
Adenovirus*	2	20	120
Papovavirus / Polyomavirus / SV40*	3	30	60
EURO-Normen 4-Felder-Test (geringe und hohe Belastung)			
EN 16615 (bakterizid, levurozid)	0,5	5	30
Flächendesinfektion nach DGHM 2001 (geringe und hohe Belastung)			
Mykobakterizid, mit Mechanik	1,5/3	15/30	60/30
RKI-Liste Flächendesinfektion			
Gem. § 18 IfSG (Desinfektion im Seuchenfall)			
Wirkungsbereich A	8	80	360

* DVV 2015 (Susp. Test)

BESTELLINFORMATIONEN

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
Incidin™ Plus Dosierbeutel	400 x 20 ml	30 125 20 PZN 006 153 97
Incidin™ Plus Dosierflasche	3 x 2 L	30 115 10 PZN 073 281 81
Incidin™ Plus Kanister	6 L	30 115 20 PZN 069 525 75

EUROPEAN HEADQUARTERS: ECOLAB EUROPE GMBH

Richtstrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland
+41 (0) 44-877-2001

www.ecolab.eu



ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49 (0) 2173-599-1900

www.ecolabhealthcare.de

ECOLAB (SCHWEIZ) GMBH
Kägenstrasse 10
4153 Reinach
+41 (0) 61-466-94-66

www.ecolabhealthcare.ch



www.ecolab.com

ANWENDUNGSBEREICH



Flüssiges Flächendesinfektionsmittelkonzentrat für Medizinprodukte



Flüssiges Desinfektionsmittelkonzentrat zur Desinfektion von Flächen aller Art.

Ⓓ BIOZID N-11720

ⒸH CHZN 1705

GEBRAUCHSANWEISUNG

Herstellen der Desinfektionslösung durch Verdünnen mit Wasser (max. 30°C).

Gebrauchslösung in gewünschter Konzentration ansetzen. Zu behandelnde Flächen feucht abwischen. Dabei auf gleichmäßige Benetzung achten. Bei der Produktanwendung stets geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.

Amin- bzw. aminderivathaltige Desinfektionsmittel und aldehydhaltige Desinfektionsmittel sind nicht im Wechsel anwendbar. Bei Umstellung ist eine gründliche Zwischenreinigung notwendig.

ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g ist als Wirkstoff enthalten: 26 g Glucoprotamin™

GUTACHTEN

Umfangreich geprüft - mikrobiologisch, toxikologisch und ökologisch.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere aktuellen Gutachten zur Verfügung.

LAGERUNG

Produkt in der Originalverpackung nicht über 25 °C lagern.

Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

BIOZIDE UND MEDIZINPRODUKTE VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS ETIKETT UND PRODUKTINFORMATIONEN LESEN. NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

