

ZUR DESINFEKTION UND ENTKALKUNG VON HÄMODIALYSE-ANLAGEN

Peresal®

Wirksam gegen Bakterien (auch TB), Pilze, Sporen und Viren

Um Patienten und Personal vor Infektionen zu schützen ist die Desinfektion von Hämodialyse-Anlagen wegen des Kontaktes mit Patientenblut unabdingbar.

- ▲ Sicher
- ▲ Wirtschaftlich

Keine Gefährdung der Patienten durch Keim-Verschleppung.



Peresal®

Wirksam gegen Bakterien (auch TB), Pilze, Sporen und Viren

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Wirksam gegen Bakterien (auch TB), Pilze und Sporen, viruzid gem. EN 14476	Höchste Sicherheit für Patienten
Saures Produkt	Verhindert bei regelmäßiger Verwendung Carbonatrückstände im gesamten Dialysekreislauf
Geringe Leitfähigkeit	Kein Vortauschen einer Dialysebereitschaft
Abgestimmte Rezeptur	Sehr gute Materialverträglichkeit
Rückstandslos ausspülbar	Keine Gefährdung der Patienten durch Verschleppung
Konzentrat	Hohe Wirtschaftlichkeit, weniger Verpackungsabfall und damit weniger Ressourcenverbrauch

WIRKSAMKEIT	KONZENTRATION %	EINWIRKZEIT Min.
Bakterien, Pilze im Suspensionstest	3	5
Sporenwirksamkeit im Suspensionstest bei 37°C	3	5
viruzid*	3	5

* gem. EN 14476

SICHER. WIRKSAM. VIRUZID.



Desinfektion und Entkalkung von Hämodialyse-Anlagen

ANWENDUNGSHINWEISE

Zur Desinfektion und Entkalkung von extrakorporalen Hämodialyse-Anlagen bei Betriebstemperatur. Peresal® wird in einer 3%igen Konzentration und mit einer Einwirkzeit von 5 Minuten angewendet. Bei der Anwendung ist die Anleitung der Gerätehersteller zu beachten. Die Anwendungslösung ist rückstandslos ausspülbar.

Nachweisreaktion: Kaliumjodid-Stärke-Papier wird ca. 5 Sekunden mit dem abfließenden Spülwasser benetzt. Wenn eine Gelbfärbung des Papiers eintritt, ist die Anlage ausreichend gespült. Hinweis: Nicht mit anderen Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln mischen. Entwickelt mit aktivchlorhaltigen oder mit chlorabspaltenden Produkten Chlorgas.

ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:
4 g Peressigsäure,
26 g Wasserstoffperoxid

GUTACHTEN

Mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch begutachtet. Zur Materialverträglichkeit liegen umfangreiche Untersuchungen vor.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Peresal	1 x 6 L	30 440 10

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

ECOLAB HEALTHCARE EUROPE

Richtstrasse 7
8304 Wallisellen
Schweiz
+41(0)44-877-2000
www.ecolab.eu

REGIONAL OFFICE

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49(0)2173-599-1900
www.ecolabhealthcare.de

