

# ENTHÄRTER UND KLARSPÜLER FÜR THERMISCHE STECKBECKEN RDG

## Anios LB 30

### SAURER KLARSPÜLER FÜR THERMISCHE STECKBECKEN RDG

- Saurer Enthärter und Klarspüler
- Tensidhaltig zur Trocknungsunterstützung
- Kalkbindend
- Speziell entwickelt für die thermische Aufbereitung von Steckbecken



### CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

- Farblose bis gelbe Flüssigkeit
- pH Wert\* (Konzentrat) 20°C: ca. 2,1
- pH Wert\* bei 0,05%: 4,0
- pH Wert\* bei 0,3%: 3,5
- Dichte (Konzentrat) 20°C: 1,021 g/ml
- Leitwert bei 0,05%, 0,3%: 47,1 - 154,8 µS/cm
- Viskosität (Konzentrat): 3,44 mPa s

\*pH Wert Messungen unter Betriebsbedingungen mit Hilfe eines pH - Meters mit Temperaturkompensation.

### BESTELLINFORMATIONEN

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
Anios LB 30	2 x 5 Liter Kanister	3095960 PZN: 153 991 43



**LABORATOIRES ANIOS**  
1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France

Vertrieb durch:

**ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH**  
Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein  
Germany

**ECOLAB (SCHWEIZ) GmbH**  
Kägenstrasse 10  
4153 Reinach  
+41 (0) 61-466-94-66  
www.ecolabhealthcare.ch



www.ecolab.com

### ANWENDUNGSBEREICH

Saurer Klarspüler für thermische Steckbecken RDGs.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

Konzentrat nur für den professionellen Einsatz. Anwendungskonzentration je nach Steckbeckenspülprogramm und Wasserhärte (0,5 bis 3 ml/Liter).

### INHALTSSTOFFE

Nicht - Ionische und Anionische Tenside im sauren Medium.

### LAGERUNG


Gefahrgut - Bitte beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch (erstellt nach den geltenden europäischen Vorschriften zur Einstufung und Kennzeichnung von chemischen Produkten). Lagerung: zwischen +5°C und +25°C.

### GUTACHTEN

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

### SICHERE VERWENDUNG VON MEDIZINPRODUKTEN

Lesen Sie die Hinweise und Informationen auf Etiketten und Produktdatenblatt.

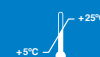

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH