

Anios RDA



Neutralisierender Spülaktivator zum Trocknen des Instruments

- Für ein strahlenderes, rückstandsloses Finish
- Kann mit Wasser jeglicher Qualität verwendet werden
- Hohe Kompatibilität mit Polysulfonen (PSU) und thermoplastischen Kunststoffen (Polyoxymethylene/POM)



Anios RDA

Neutralisierender Spülaktivator zum Trocknen des Instruments



Anios RDA
5 L Kanister



Anios RDA
20 L Kanister

Produkteigenschaften

- Hellgelbe, klare Flüssigkeit
- pH-Wert* unverdünntes Produkt bei 20°C: min 2,1 - max. 4
- pH-Wert* bei Verdünnung auf 0,03%: ca. 4
- pH-Wert* bei Verdünnung auf 0,1%: ca. 3,6
- Dichte bei 20°C: 1,035
- Leitfähigkeit bei 0,03% - 0,1%: 67 - 139 µS/cm

*pH-Wert-Messungen unter Betriebsbedingungen immer mit einem pH-Meter mit Temperaturkompensation

Verpackungs- und bestellinformation

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Anios RDA	2 x 5 L Kanister	3112440
Anios RDA	1 x 20 L Kanister	3124550



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Vertrieb durch:

ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

Anwendungsbereich

Produkt für die Spülung von medizinischen Produkten in automatischen Reinigungsgeräten, die mit osmotisiertem oder nicht osmotisiertem Wasser betrieben werden. Neutralisiert alkalische Rückstände von Waschmitteln und Wasser während des Waschzyklus. Trocknungsbeschleuniger.

Gebrauchsanweisung

Anwendung im Spülzyklus nach Verdünnung auf 0.03 bis 0.1% (d. h. 0.3 bis 1 mL auf 1 l Wasser geben). Bei allen Thermodesinfektionszyklen einsetzbar.

Inhaltsstoffe

Nichtionische und anionische Tenside, Milchsäure, Ethanol und Hilfsstoffe.

Lagerung


Gefährlich - Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch (erstellt gemäß den geltenden europäischen Vorschriften für die Klassifikation und Kennzeichnung chemischer Produkte). Lagerung zwischen +5°C und +25°C.

Gutachten

Wissenschaftliche Dokumentation (Wirksamkeit, Kompatibilität usw.) auf Anfrage erhältlich.

Medizinprodukte immer unter sicheren Bedingungen verwenden

Vor dem Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen lesen. Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Medizinprodukt ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu melden.

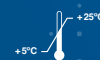

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™