

Anios RL



Klarspüler für die Instrumentierung

- Trocknungsaktivator für schnelles und rückstandsfreies Trocknen
- Hochkompatibel mit Polysulfonen
- Für alle Maschinentypen geeignet



Anios RL

Klarspüler für die Instrumentierung



Produkteigenschaften

- Farblose klare Flüssigkeit
- pH-Wert des Konzentrats* bei 20°C: ca. 7,2
- pH-Wert verdünnt auf 0,08%*: ca. 5,8
- pH Wert verdünnt auf 0,3%*: ca. 6,2
- Dichte bei 20°C: 1,013

* pH-Wert-Messungen unter Betriebsbedingungen immer mittels pH-Meter mit Temperaturkompensation.

Verpackungs- und bestellinformationen

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Anios RL	2 x 5 L Kanister	3112390
Anios RL	1 x 20 L Kanister	3124560
Anios RL	1 x 200 L	3118930



CE **LABORATOIRES ANIOS**
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Vertrieb durch:

ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

Anwendungsbereich

Neutrale Klarspüler für chirurgische und medizinische Instrumente. Kombinationsprodukt zur Gewährleistung eines raschen und rückstandslosen Trocknens.

Gebrauchsanweisung

Konzentrierte Lösung. Vor der Anwendung je nach Gerätetyp in kaltem oder warmem Wasser auf 0,08 bis 0,3 % verdünnen (d. h. 0,8 bis 3 ml auf einen Liter Wasser geben).

Inhaltsstoffe

Verbindung aus Tensiden, Entschäumer, Stabilisierungsmittel, Hilfsstoffe.

Lagerung


Gefährlich – Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung (erstellt gemäß den geltenden europäischen Vorschriften zur Einstufung und Kennzeichnung chemischer Produkte). Lagerung: +5°C bis +25°C.

Gutachten

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

Sichere verwendung von medizinerzeugnissen

Lesen Sie die Hinweise und Informationen auf dem Etikett und dem Produktdatenblatt.

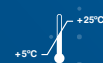

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

ECOLAB
PROTECTING WHAT'S VITAL™