

Anios RN



Neutralisierender Klarspüler für Instrumente

- Geeignet für kurze Tankwaschzyklen
- Entfernt mineralische Ablagerungen
- Nachweisbar durch Konduktimetrie



Anios RN

Neutralisierender Klarspüler für Instrumente



Anios RN
5 L Kanister

Anios RN
20 L Kanister

Produkteigenschaften

- Klare und farblose Flüssigkeit
- pH Wert des Konzentrats* bei 20°C: max. 1,00
- pH Wert verdünnt auf 0,1%*: ca. 2,6
- pH Wert verdünnt auf 0,5%*: ca. 2,0
- Dichte bei 20°C: 1,184
- Leitfähigkeit bei 0,1%, 0,3%, 0,5%: 0,869 - 2,00 - 2,84 mS/cm

*pH-Wert-Messungen unter Betriebsbedingungen immer mittels pH-Meter mit Temperaturkompensation.

Verpackungs- und Bestellinformationen

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Anios RN	2 x 5 L Kanister	3112370
Anios RN	1 x 20 L Kanister	3124400

Anwendungsbereich

Neutralisierung alkalischer Reinigungsmittel- und Wasserrückstände aus dem Waschzyklus des Reinigungs- und Desinfektionsgeräts für medizinische Produkte.

Gebrauchsanweisung

Konzentrierte Lösung.
Anwendung im Spülzyklus nach Verdünnung auf 0,1 bis 0,5 % (d. h. 1 bis 5 mL auf 1 l Wasser geben). Eine zusätzliche Spülung mit Wasser oder einem pH-neutralen Produkt muss am Ende des Waschgangs erfolgen.

Inhaltsstoffe

Phosphorsäure, Tenside.

Lagerung

Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung (erstellt gemäß den geltenden europäischen Vorschriften zur Einstufung und Kennzeichnung chemischer Produkte). Lagerung: zwischen +5°C und +25°C.

Gutachten

Wissenschaftliche Dokumentation (Wirksamkeit, Kompatibilität usw.) auf Anfrage erhältlich.

Medizinprodukte immer unter sicheren Bedingungen verwenden


Vor dem Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen lesen. Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Medizinprodukt ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu melden.



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Vertrieb durch:

ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

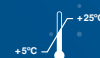

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™