

# FÜR TRANSÖSOPHAGEALE ECHOKARDIOGRAPHIE (TEE)

## TEE-Schutzhülle

Vielseitige, latexfreie Schutzhülle mit Applikator für die einfache Anwendung

Ultracover™ bietet Ihnen eine komplette Serie Einwegschutzhüllen für eine vielseitige und hygienische Verwendung von Ultraschallwandlern. Das breit gefächerte Sortiment der Ultracover™-Schutzhüllen von Microtek besteht aus hochwertigen, latexfreien Produkten.

Der wichtigste Vorteil der Ultracover™-Schutzhüllen besteht darin, dass

die Gefahr einer Übertragung von Infektionskrankheiten auf Patienten und Personal stark verringert wird. Für jede medizinische Disziplin, in der Ultraschall verwendet wird, bietet Ultracover™ die geeignete Lösung.


- ▲ Vielseitig
- ▲ Hygienisch
- ▲ Latexfrei



# TEE-Schutzhülle

Vielseitige, latexfreie Schutzhülle mit Applikator für die einfache Anwendung

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Abdeckung ist für alle Ultraschallgeräte konzipiert	Nahtlose und sehr elastische Schutzhülle für optimale Anpassung und Patientenkomfort
Latexfrei	Schutz für Patienten mit Latexallergie
Applikator für eine einfache und schnelle Anwendung	Einfache Anwendung der Schutzhülle
Eine mit Transmissionsgel gefüllte Spritze im Set enthalten	Schnelle und einfache Verteilung des Gels, Zeitersparnis
Einzel getestet	Optimaler Schutz für den Patienten und den Anwender

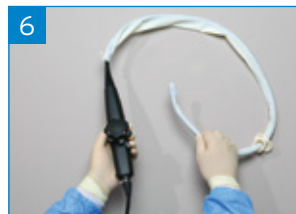

VIELSEITIG.  
HYGIENISCH.  
LATEXFREI.

## ANWENDUNGSHINWEISE

Empfohlene Anwendungstechnik (Abbildungen links):

1. Transmissionsgel in den oberen Bereich der Schutzhülle einspritzen.
2. Entfernen Sie die Spritze.
3. Gel gleichmäßig verteilen.
4. Führen Sie den Umwandler durch den Applikator in die Schutzhülle ein.
5. Entfernen Sie den Applikator.
6. Die Schutzhülle mit Hilfe der Drehverriegelung befestigen, den Beißring anbringen und die Schutzhülle ist einsatzbereit.

## SERVICE

Für weitere Informationen zu unseren Produkten oder zur Auftragserteilung kontaktieren Sie bitte **+49 (0) 69-2222-2950**.

Besuchen Sie unsere Website: [www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

## BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
PU Set UC 30/16/1000 Steril	12 Stück	87111